

rhinophar®

Mouche-bébé

Le mouche-bébé rhinophar® apporte un nouveau confort d'utilisation et une excellente hygiène pour moucher le nez des enfants. C'est un produit indispensable pour désencombrer le nez et ainsi limiter la surinfection. Grâce à son système de filtration innovant, il aspire efficacement et assure une hygiène parfaite. Le mouche-bébé rhinophar® est un Dispositif Médical de classe 1.

L
E
S
+
P
R
O
D
U
I
T

Embout buccal avec encoche :
ne glisse pas, tient
parfaitement en bouche.

Filtre avec languette :
se change facilement pour
une hygiène optimale

Réservoir transparent :
contrôle visuel de l'efficacité
du mouchage

Embout nasal « toucher soft » :
meilleur confort de bébé

Pourquoi choisir le mouche-bébé rhinophar® ?

Le mouche-bébé rhinophar® est la solution idéale pour tous ceux et celles qui souhaitent moucher leur bébé efficacement. Son ergonomie offre une facilité d'utilisation maximale et intuitive. Son filtre performant et économique se change facilement à chaque mouchage, garantissant ainsi les meilleures conditions d'hygiène.



- 
Meilleur confort : la taille de l'embout nasal assure un meilleur confort à bébé lors de l'introduction dans son nez. Sa texture douce évite de blesser ses narines.
- Meilleure hygiène :** plus besoin de mettre les doigts dans le mucus pour changer le filtre du mouche-bébé ! Le filtre rhinophar® est très innovant. Il est équipé d'une languette pour être changé facilement sans se salir les mains.
- Meilleure efficacité :** la technologie de filtration rhinophar® assure un mouchage performant. Le mucus est aspiré sans forcer. Il reste stocké dans le réservoir sans retour possible vers le nez de bébé. Hygiène parfaite garantie !
- Meilleure ergonomie :** l'embout buccal avec encoche ne glisse pas et tient parfaitement en bouche. Maman garde une main libre pour bébé.
- Fabriqué en France** - sans bisphénol - sans phtalate

Comment utiliser le mouche-bébé rhinophar® ?



- 1** Placer le filtre dans le réservoir du mouche-bébé rhinophar®.



- 2** Allonger bébé sur le dos et administrer du sérum physiologique dans sa narine, en lui maintenant la tête sur le côté.




- 3** Positionner l'embout nasal dans la narine de bébé et prendre l'embout buccal en bouche. Aspirer.



- 4** Répéter les opérations 2 et 3 pour l'autre narine de bébé.



- 5** Ouvrir le mouche-bébé et retirer le filtre grâce à sa languette.

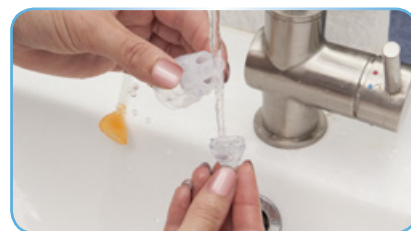

- 6** Jeter le filtre usagé. Nettoyer à l'eau savonneuse l'embout nasal et le réservoir après chaque utilisation.

Ne pas stériliser à chaud. Les filtres sont à usage unique.

Fichetechnique

- Le coffret rhinophar® contient 1 mouche-bébé + 3 filtres.
- Vendue séparément : la boîte de 10 filtres + 1 embout nasal.

Fabricant : Stiplastics
 53, route du port - ZI les Ors - 38160 Beauvoir en Royans
Code EAN mouche-bébé : 3401095077231
Prix public conseillé mouche-bébé : 6.50 € TTC
Prix public conseillé recharges : 3.90€ TTC